



ЕАС



Лампа для сушки окрашиваемых изделий из оксида циркония

ЛАМПА 1.1 ЦИРКОН



**Этикетка
АВЕ 197.000.000 ЭТ**

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.64778/23
от 13.02.2023

для CAD-CAM систем

Мобильное Приложение АВЕРОН:



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 ЛАМПА 1.1 ЦИРКОН (далее - ЛАМПА) серии ЛАМПА ЦИРКОН, предназначена для сушки окрашиваемых изделий из оксида циркония. АВЕ 27.90.11-069-52331864-2023 ТУ.

Предназначена для совместной работы с ЭМП 2.0 ЦИРКОН.

1.2 Особенности и назначение:

- инфракрасная лампа мощностью 250 Вт с выключателем на корпусе;
- регулировка положения лампы по высоте в диапазоне 50...100 мм от рабочего столика до колбы;
- компактное исполнение конструкции не требует много места в лаборатории;
- предназначена для совместной работы с ЭМП 2.0 ЦИРКОН.

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °C
- влажность при 25 °C, не более 80 %

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание ~220В 50Гц 1,2А
- мощность ИК-лампы 250 Вт
- габариты (Ш×Г×В), не более 220×220×335 мм
- масса, не более 2,2 кг

3 КОНСТРУКЦИЯ И КОМПЛЕКТНОСТЬ

ЛАМПА 1.1 ЦИРКОН

1 шт:

1 – инфракрасная ламп

2 – выключатель

3 – барашек для регулировки положения лампы по высоте

Этикетка АВЕ 197.000.000 ЭТ

1 шт.

☒ Поставка по дополнительной заявке

- Сменная инфракрасная лампа ЛС 1.0 ЦИРКОН.



4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Розетка электропитания должна иметь контакт защитного заземления.
- Размещайте аппарат на безопасном расстоянии от любых легковоспламеняющихся материалов.
- Не прикасайтесь к работающей лампе во избежание ожогов.
- Строго запрещено смотреть на включенную лампу без специальных защитных очков
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра

5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед началом эксплуатации отрегулируйте лампу на высоту примерно 90 мм от основания, ослабив барашек **(3)** на задней стенке ЛАМПЫ. Переместите ИК-лампу на нужную высоту и затяните барашек.



НЕ ТРОГАЙТЕ ИК-лампу голыми руками во избежание преждевременного выхода её из строя, используйте чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.

- Промойте изделие под проточной водой для удаления пыли и поместите под ИК-лампу.
- Включите ЛАМПУ выключателем **(2)**, просушите изделие не менее 20 мин.
- Высушенное изделие можно подвергать покраске (см. инструкцию на краситель).
- Окрашенное изделие поместите под ИК-лампу. Просушите до полного высыхания, но не менее 20 мин.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техобслуживание проводите после отключения ЛАМПЫ от сети.

Замена ИК-лампы:

- ослабьте барашек на задней стенке и опустите ИК-лампу в нижнее положение;
- выкрутите ИК-лампу из патрона против часовой стрелки;
- закрутите новую ИК-лампу в патрон. *Здесь и далее* ИК-лампу голыми руками не трогайте, используйте чистые салфетки, ветошь или ХБ-перчатки.
- поднимите ИК-лампу на нужную высоту и затяните барашек на задней стенке.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛАМПЫ не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛАМПЫ не требуется.

8 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи или, если она не указана, то с даты выпуска Изготовителем, кроме инфракрасной лампы.

Гарантийный срок на ИК-лампу - 6 месяцев с даты продажи.

Установленный Изготовителем срок службы ИК-лампы - 6500 часов.

По истечении срока службы Изготовитель не несет ответственность за обеспечение возможности использования Изделия по назначению, включая его безопасность.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Перечень авторизованных сервисных центров приведен на сайте АВЕРОН:
<https://www.averon.ru/service/>.

Разрешительные документы для указанной продукции см. на сайте www.averon.ru.

Изготовитель:

ООО "ВЕГА-ПРО"

www.averon.ru

Юр. адрес: Россия, 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д.127, помещ. 1,
тел.: +73433111121,

feedback@averon.ru

Адрес производства: Россия, 620902, Свердловская обл., г.о. город
Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр.4

Бесплатный звонок по РФ:

88007001220

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ

88007001102

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей
технической документации

Исправления не допускаются

ЛАМПА 1.1 ЦИРКОН	
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.