



**Комплект
для изготовления опок
для прессования керамики**

КОМПЛЕКТ 0.35 ПРЕСС



**Этикетка
АВЕ 370.100.000 ЭТ**

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплект форм **КОМПЛЕКТ 0.35** используется для изготовления опок из паковочных масс, предназначенных для пресс-керамики и рассчитанных на работу без металлических опокowych колец. Применяется в технологии прессования керамики с использованием Электропечей вакуумных “ЭВП АВЕРОН” (например, **х.х ПРЕСС**).

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

КОМПЛЕКТ 0.35 ПРЕСС - комплект для изготовления опок Ø 35 мм (для опок 100 г).

Состав комплекта (см. рисунок):

- 1 – формирующая подставка
- 2 – выравнивающее кольцо
- 3 – полиуретановое кольцо



3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Изготовление опки

Выберите формирующую подставку (1) с учетом количества одновременно изготавливаемых изделий.

На подставку приклейте на воск штифты с восковыми моделями (см. рисунок), после чего подставку аккуратно установите в кольцо (3).



Замешивание паковочной массы производится в Смесителе вакуумном (например, **СВЗ–“Аверон”**), а заливка - на Вибростоліке (например, **ВБ 1.1 “АВЕРОН”**). Сразу после заливки установите выравнивающее кольцо **(2)**. Излишки паковочной массы должны выступить в отверстие выравнивающего кольца.

После затвердевания паковочной массы разберите комплект и выньте из кольца **(3)** готовую опоку. Удалите ножом все неровности с поверхности опоки. Перед прессованием опока помещается в Электропечь муфельную (например, **ЭМП АВЕРОН**) для выплавки воска и предварительного разогрева опок до температуры литья.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель: ООО "ВЕГА-ПРО" www.averon.ru

Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург,

Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1,

тел.: +7 343 311 11 21

feedback@averon.ru

Адрес производства: 620902, РФ, Свердловская область, город Екатеринбург, г.о. Екатеринбург, ул. Николы Тесла, стр. 4

бесплатный звонок по РФ:

8 800 700 12 20

Сервис-центр: бесплатный звонок по РФ 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

КОМПЛЕКТ 0.35

Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	
Дата выпуска	
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска,